
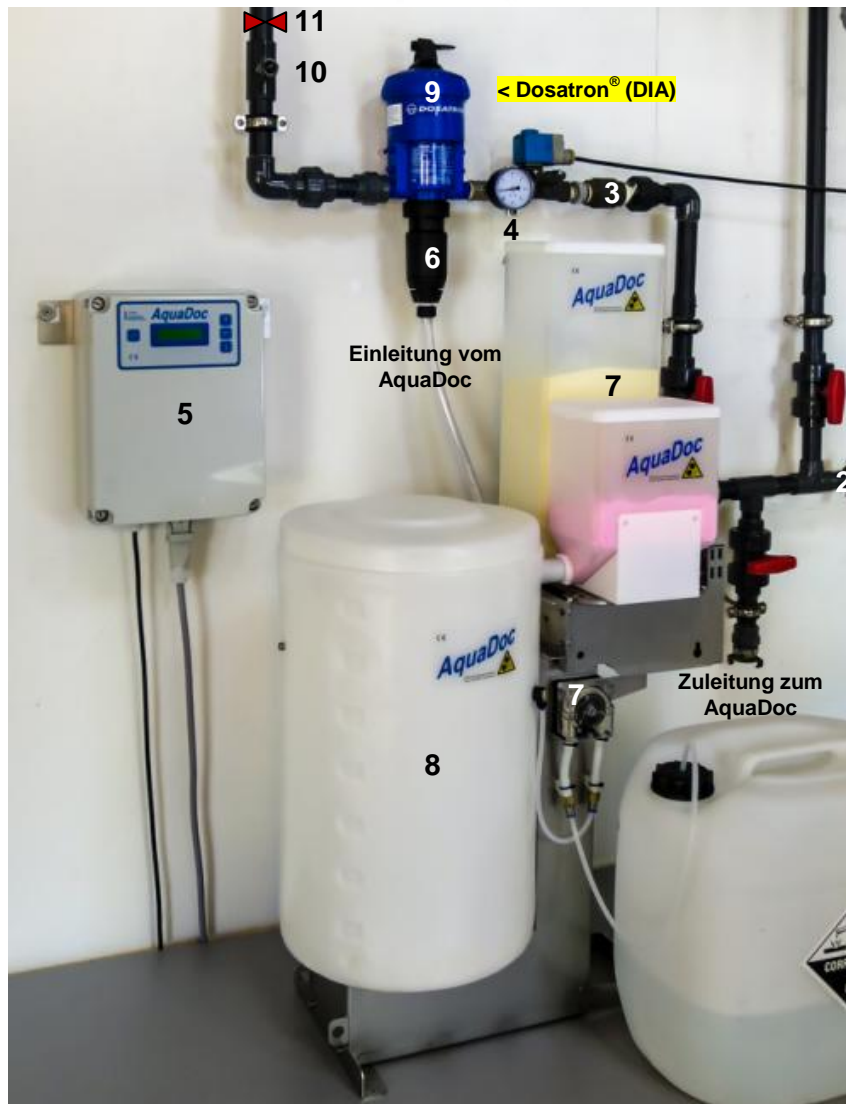


Prüfen Sie vor der Installation die Vollständigkeit der Lieferung und nehmen Sie - falls erforderlich - benötigte Bauteilergänzungen am vorhandenen Wasserleitungssystem - anhand der nachfolgenden Schemata - vor und verbinden dann Ein- und Ausgang des AquaDoc mit diesem.

Dabei ist darauf zu achten, dass das Rückschlagventil so einzubauen ist, dass medikamentiertes Wasser nicht in die Wasserversorgung gelangen kann. Außerdem muss nach dem Dosatron unbedingt ein Schauglas sowie die Probenahmestelle in die Wasserleitung eingebaut sein/werden.

Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Wasserzufuhr!

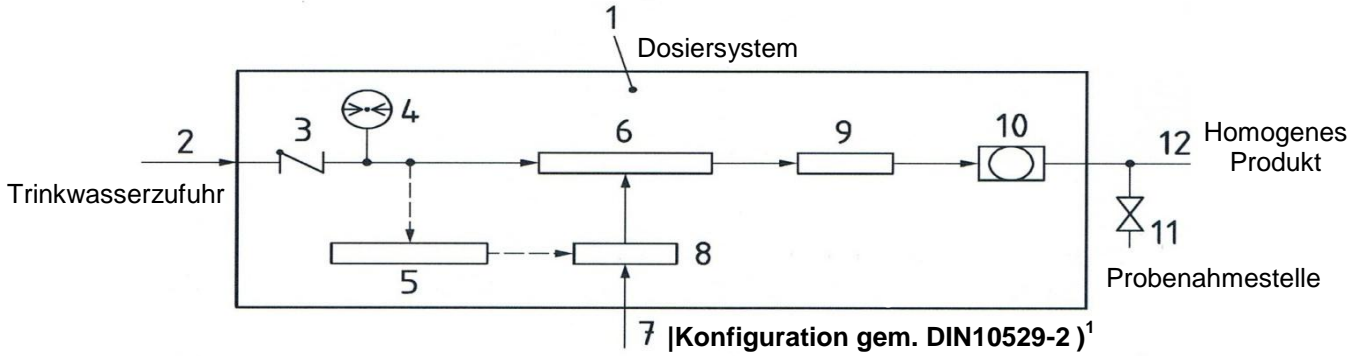

- 3 Rückschlagventil
- 4 Druckanzeige
- 5 Regeln Computer
- 6 Zusammenführen
- 7 Tierarzneimittel
- 8 Dosieren
- 9 Mischen
- 10 Schauglas

Zum Abschluss der Arbeiten setzen Sie dann noch die/den Dosierbehälter auf die Dosierkonsole und öffnen alle Absperrventile.

)¹ Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Installation der elektrischen Komponenten und Gehäuse



Der elektrische Anschluss des MediPut Systems (**Schaltplan siehe Handbuch Kap. IV/Ziff. 4**) ist durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen und dabei entsprechend den Vorgaben der VDE Norm 0100/0705 über einen FI - Schutzschalter abzusichern. Dabei auf richtige Drehrichtung des Dosiergetriebes achten!

Stationäre Anlage

Geeigneten Platz für Steuerungscomputer finden und dort anbringen. Kabelverbindungen zwischen Computer und dem AquaDoc Gerätesatz herstellen. Steuerungscomputer mit Spannungsquelle oder einer dafür geeigneten Steckdose verbinden.

Mobile Anlage

Falls nicht vorhanden, (Steckdose)* installieren und anschließend entsprechend verkabeln.

Kabelverbindungen zwischen Steuerungscomputer und dem AquaDoc Gerätesatz herstellen. Gerätestecker der Anlage mit einer dafür geeigneten Steckdose verbinden.

Noch offene Schaltkästen schließen, lose Leitungen und Schläuche sichern, **Stromversorgung einschalten und Gerät gem. den Vorgaben** Handbuch ab Seite 16 "Erste Inbetriebnahme und Einstellungen" **weiter einrichten.**

)* *Optional - nicht im Lieferumfang enthalten*

Diese Montage Kurzanleitung ist nur ein Auszug aus dem ausführlichen Handbuch für den MediPut welches der Anlage ebenfalls beigefügt ist. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb bitte dieses zur Hand.

Beachten Sie zudem immer auch alle Sicherheitsbestimmungen!