

Diese Montage Kurzanleitung ist nur ein Auszug aus dem ausführlichen Handbuch für den MediPut, das der Anlage ebenfalls beigelegt ist. Im Zweifelsfall nehmen Sie deshalb bitte dieses zur Hand.

Beachten Sie zudem immer alle Sicherheitsbestimmungen!

Zwei **Versionen des MediPut Big ohne Mengenmessung** sowie ein zusätzlichen Wetterschutz stehen zur Verfügung. Anbau an Rohrdurchmesser bis 120 mm und Steigung bis 35° möglich.



Version 1



Version 2



Wetterschutzblech

Unterschiede in der Montage:

Version 1 wird hinter oder ggf. vor dem Futterzuführungsrohr montiert.

Version 2 wird über dem Futter-Zuführungsrohr montiert.

Wetterschutzblech erforderlich für beide Versionen im Außenbereich.

Prüfen Sie als erstes die gelieferten Teile der Anlage **vor der Montage auf Vollständigkeit, korrekte Version sowie Futterrohr-Adapter Größe und Ausführung!**




Die MediPut **Dosierer-Mechanik** darf nur in trockenen Räumen oder - falls nicht möglich - mit einem Spritzwasser und Witterungsschutz installiert werden. Zudem ist sie zusätzlich auch vor Staub zu schützen.



Vor dem Öffnen eines Futterrohres ist die dazu gehörende Förderanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Bei der Montage des MediPut Adapter auf das Futterrohr darauf achten, dass die Öffnung des Futterrohres durch diesen komplett geschlossen ist.


Montage Dosierer Mechanik

Die folgenden **Montagehinweise am Beispiel einer Förderanlage mit Steigung** sind sinngemäß auch für Anlagen ohne Steigung sowie für beide Versionen des MediPut Big anwendbar.

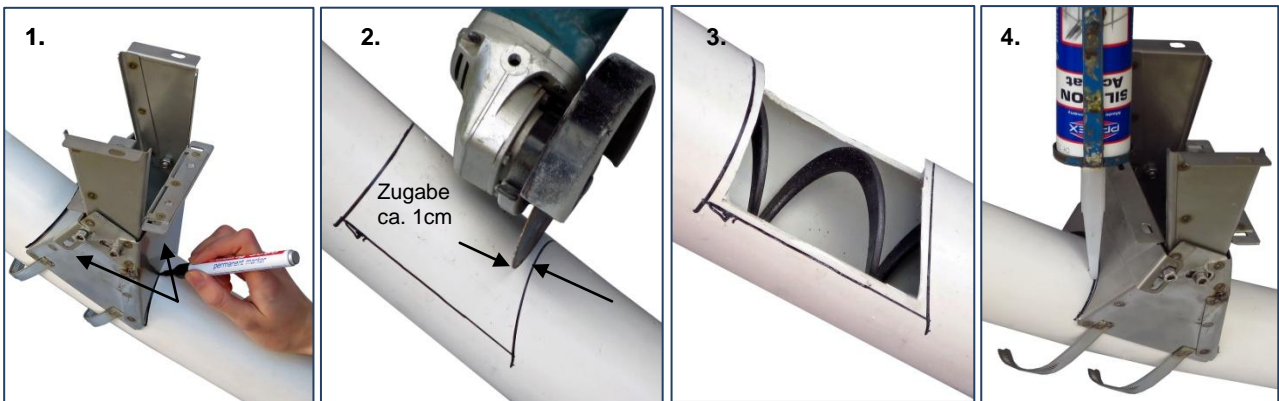

1. Grundhalterung (Adapter) mit Dosiererseite rechts in Position auf Förderrohr - jedoch nicht höher als die Stützenhöhe (siehe Bild 6.) der Dosiermechanik zulässt – aufsetzen und dann äußere Konturen auf dem Förderrohr nachzeichnen.
2. - 3. Markiertes Rechteck - unter Zugabe von jeweils ca. 1cm Rand zur Rechteckmitte - mit kleiner Flex ausschneiden, anschließend den Ausschnitt entgraten und. Rohrinne-seite von Fremdstoffen reinigen.
4. Auflageflächen des Adapters (1 cm Rand) mit Silicone belegen, Adapter aufsetzen und mit Bandschellen lose sichern.


Montage MediPut Big - ohne Mengenmessung –

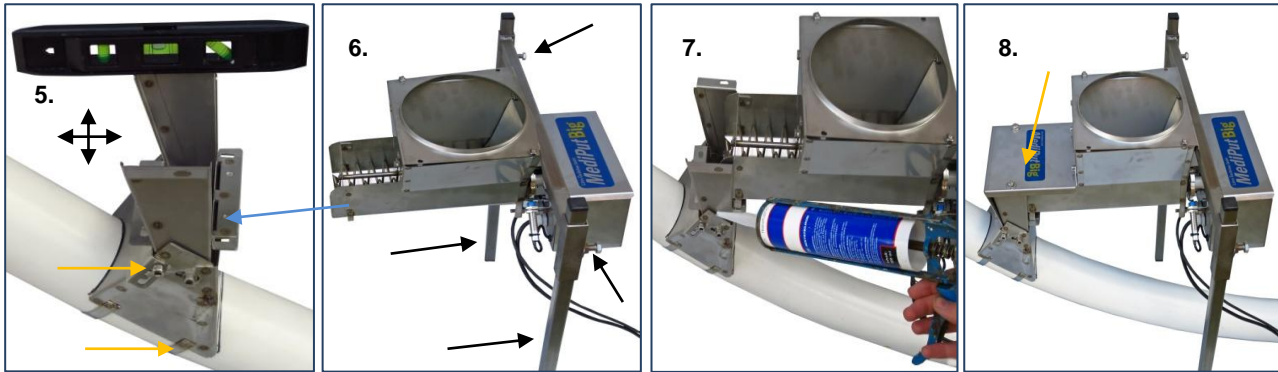

5. Grundhalterung (Adapter) horizontal sowie vertikal auf Förderrohr ausrichten - danach Position durch endgültiges Festziehen der Bandschellen und seitlichen Inbusschrauben sichern

6. - 7. Stützbeine in Halterungen einführen und lose - in geschätzter Höhe - mit Schrauben sichern, Dosiermechanik in Adapter einhängen und durch Verstellen der Stützbeinhöhe horizontal sowie vertikal ausrichten. Danach Stützbeinschrauben endgültig festziehen und anschließend die Gelenkfugen des Adapters mit Silicone abdichten.

8. Abschließend noch den Gehäuse-Deckel aufsetzen und mit 4 Schrauben sichern.

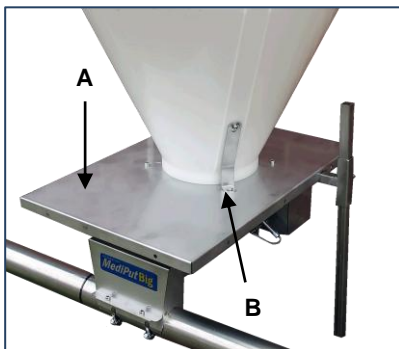

Zum Abschluss der Montage:

- Bei Außenanlagen noch das Wetterschutzblech (A) anbringen
- Behälter (Trichter) mit zwei Laschen (B) und Schrauben auf die Dosiermechanik montieren.

Elektrischer Anschluss



Der elektrische Anschluss der Anlage ist durch eine Elektrofachkraft gem. beigefügtem Schaltplan im Handbuch vorzunehmen und durch einen FI - Schutzschalter entsprechend den Vorgaben der VDE Norm 0100/0705 abzusichern.

Achtung! Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen diese immer spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.


Durchführung:

- MediPut Computer montieren,
- Computer mit Dosiermechanik elektrisch verbinden,
Beachte dabei - Ein MediPut Big kann nur über die Anschlussklemmen Dosierer 2 oder 3 betrieben werden!
- Anlage an Stromnetz anschließen,
- noch offene Schaltkästen schließen und lose Leitungen sichern!

Danach **MediPut Computer einschalten und Dosiersystem** gem. den nachfolgenden Schritten **zusammen mit dem Landwirt weiter einrichten/überprüfen**. Dabei auch auf richtige Drehrichtung des Dosiergetriebes achten!


Generelle Bedienung und Funktionselemente

= Drücken = Drücken & Halten

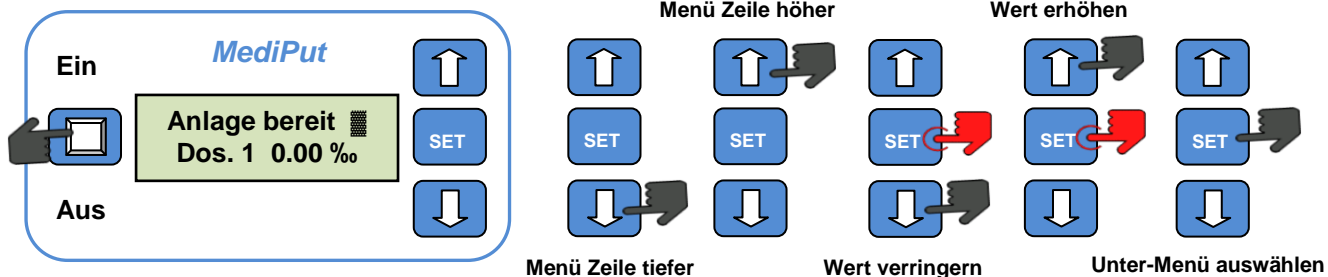


Einstellung Dosierer MediPut Big (Am Beispiel Dosierer 2)


- Betrieb nur an Dosierer 2&3 möglich -

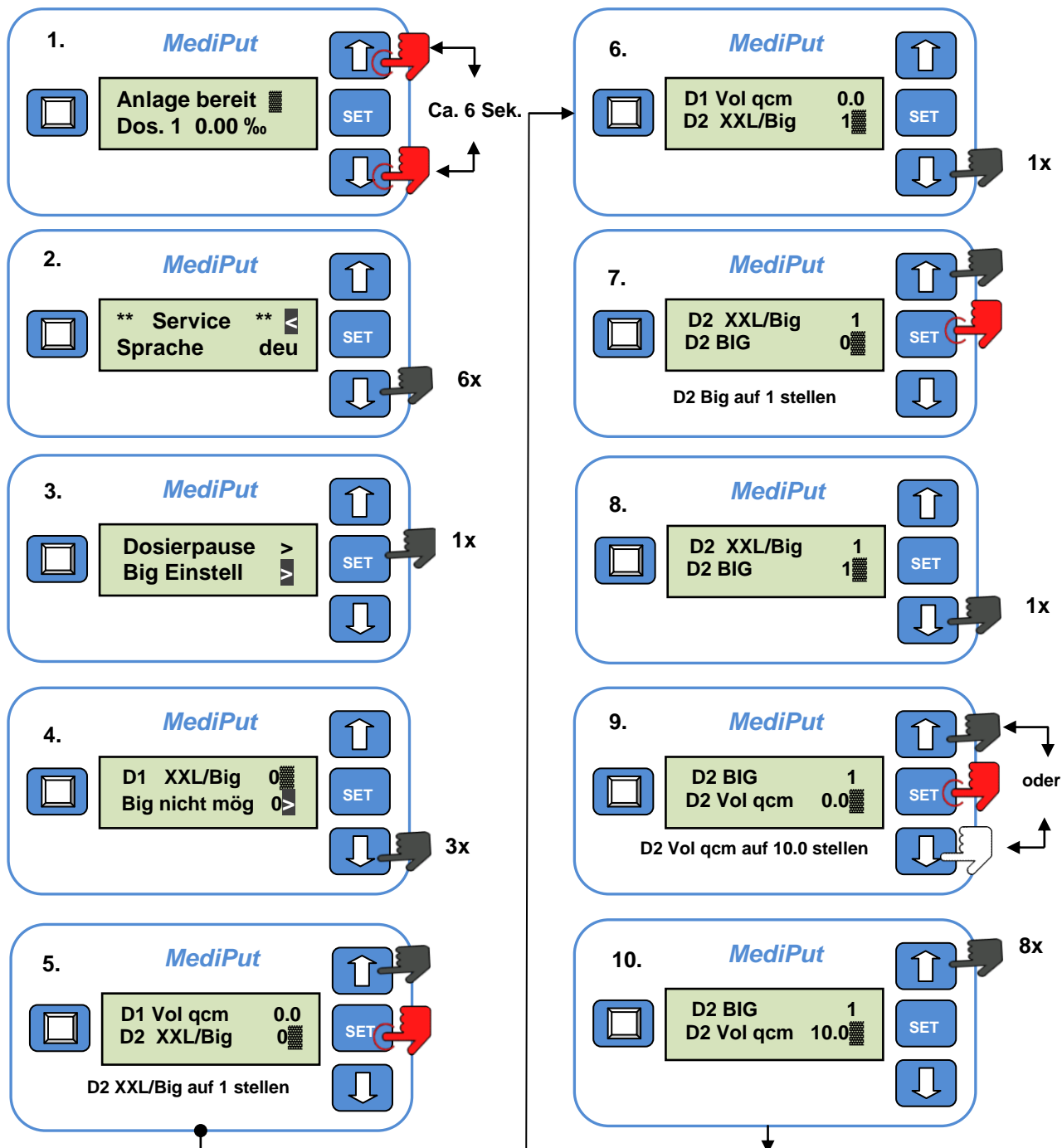

Montage MediPut Big - ohne Mengenummessung -

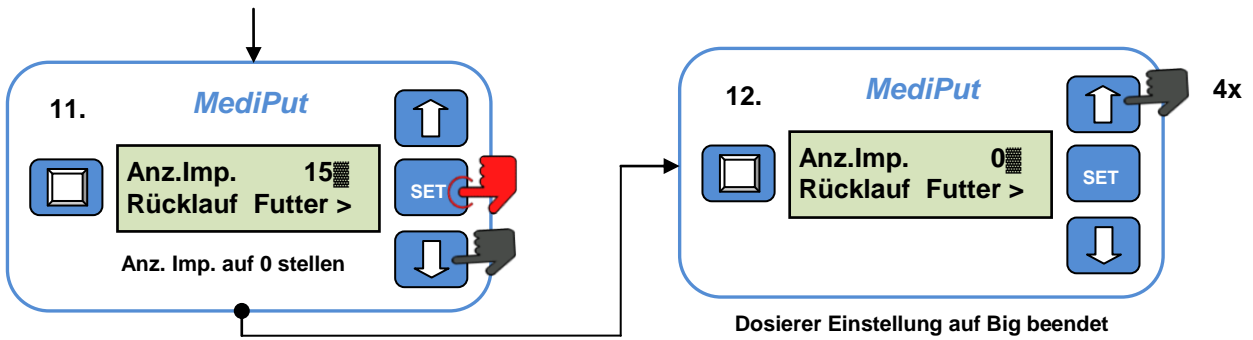

Funktionstest Dosierer (Am Beispiel Dosierer 2 | Anzahl Dosierer aktiv = 2)

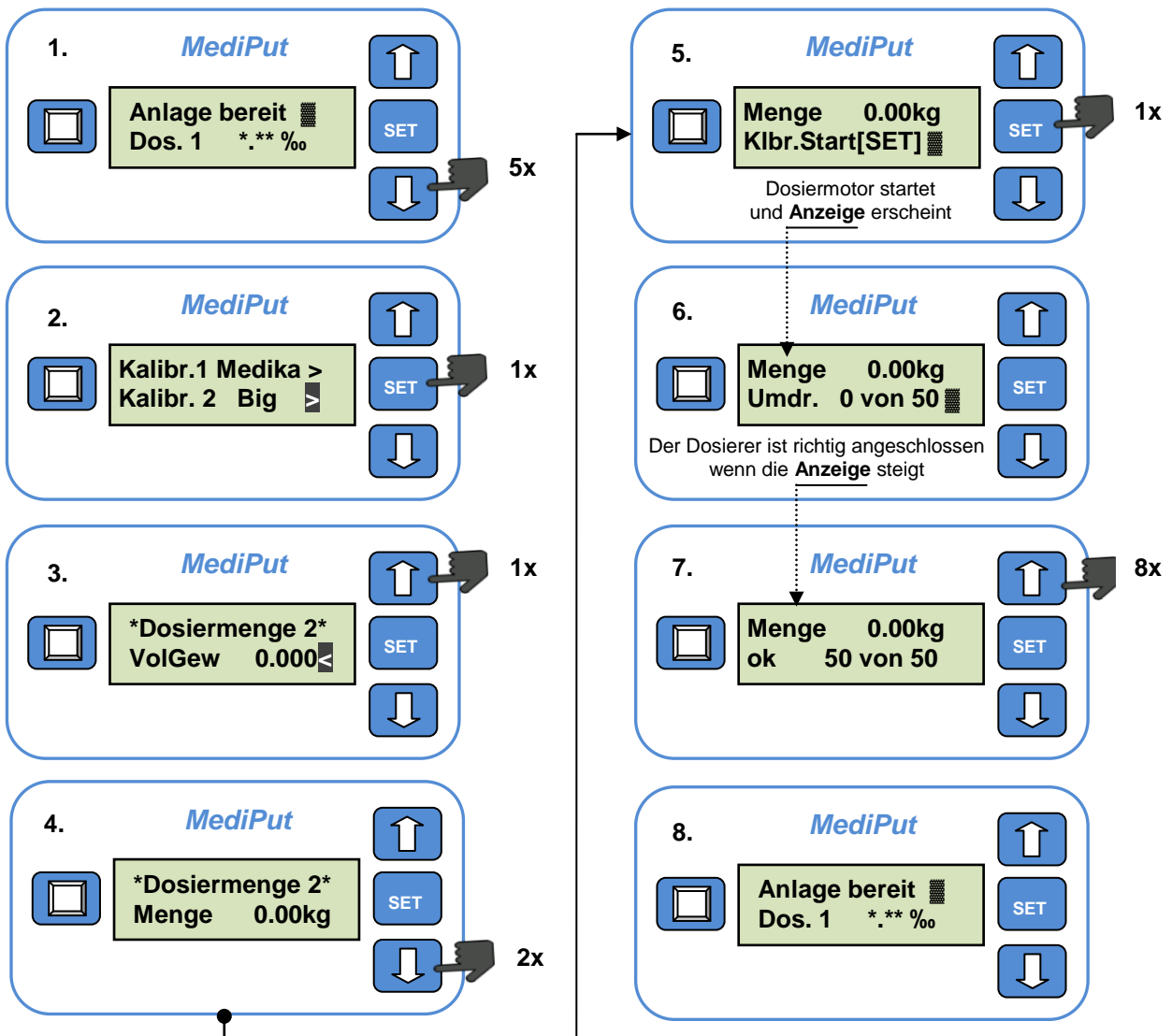

Zum Abschluss führen Sie nun noch die **restlichen** - für das Dosiersystem **erforderlichen Einstellungen** - gem. **Handbuchvorgaben** "Erste Inbetriebnahme und Einstellungen" durch.