






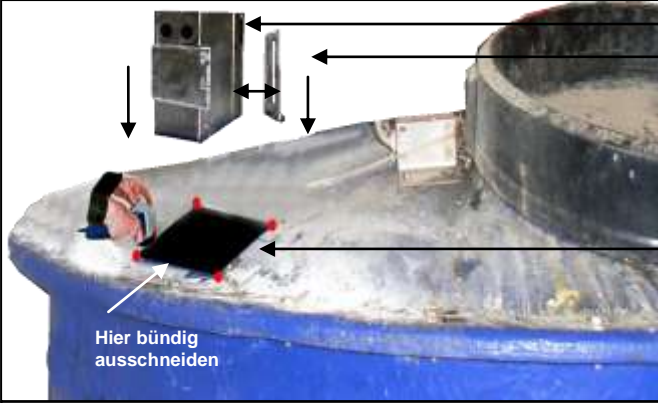


Die MediPut Anlage wird je nach Bedarf in unterschiedlichen Konfigurationen ausgeliefert. Prüfen Sie deshalb **vor** der Montage die Vollständigkeit der gelieferten Teile!

Achtung: Beachten Sie bitte unbedingt die Unfall- und Sicherheitshinweise im MediPut Handbuch!

 <p>Hier bündig ausschneiden</p>	<p>Grundhalterung (Adapter - Dosiererseite vorne) mit angeschraubten Halterungen in Position auf Futterbottich aufsetzen, Inneren Ausschnitt und Bohrlöcher für die Halterungen markieren, Markierung nachzeichnen und dabei an der Dosiererseite etwas zugeben. [Ansonsten ist ein Überstand von ca. 1cm tolerabel].</p> <p>Markierten Teil ausschneiden, Löcher bohren Ausschnitt und Löcher entgraten.</p> <p>Achten Sie bitte während der o.a. Arbeitsschritte darauf, dass kein Fremdmaterial in die Tiernahrung gelangt!</p>	
		
<p>Über den vorgebohrten Löchern die 4 Halter - mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern - lose auf dem Bottich befestigen. Danach die vormontierte Dosier Konsolenhalterung auf gleiche Weise mit den Haltern verbinden. Kombination passgenau über dem Ausschnitt ausrichten und alle Schrauben endgültig fixieren. Schlusskanten [Halterung Bottich] innen und auch ggf. außen mit Silikon bündig abdichten. Zum Abschluss noch Deckel der Dosierer Konsolenhalterung mit Schrauben anbringen.</p>		
		 <p>Fertig montierte Anlage.</p>
<p>Dosier Konsole an Dosier Konsolenhalterung anbringen und mit Schrauben befestigen. Dosierstoffbehälterrohr in eine der Öffnungen einführen (ggf. zuvor Blindstopfen entfernen), Behälter aufsetzen, durch Zurückziehen mit dem Motor verbinden und mit einer Sicherungsklammer sichern. Ablenkleb (nur bei großen Behältern) einbringen, und mit Deckel schließen. Ggf. noch 2. Behälter wie zuvor beschrieben, aufsetzen.</p>		
<p>- Installation der elektrischen Komponenten -</p>		
<p>Geeigneten Platz für Steckdose(n) und Steuerungscomputergehäuse finden und dort anbringen. Die entsprechenden Kabelverbindungen zwischen Steuerungscomputer, Steckdose(n), Dosieranlage und Spannungsquelle gemäß dem beigegeführten Schaltplan und den Vorgaben im Handbuch für den MediPut Mixer herstellen und verdrahten.</p> <p>Offene Schaltkästen schließen und Stecker der Dosierer in die entsprechende Steckdose einstecken.</p>		